

FICHA TÉCNICA CARETA | PARA PROTECCIÓN FACIAL




Descripción general y aplicaciones

Modelo diseñado para la protección del personal a cargo de pacientes de COVID-19. No obstante, se puede ampliar su aplicación para todo el sector salud, especialmente en operaciones donde exista riesgo de contacto de fluidos hacia el rostro del personal de salud.


Características

De Fabricación	Material	Densidad	Calibre	Fabricación
Pantalla Protectora	Lámina rígida tipo PET tipo industrial	1,34	12 mils	Extrusión
Diadema Soporte	Polipropileno	0,905 g/cm ³	NA	Inyección

Recomendaciones previas al uso

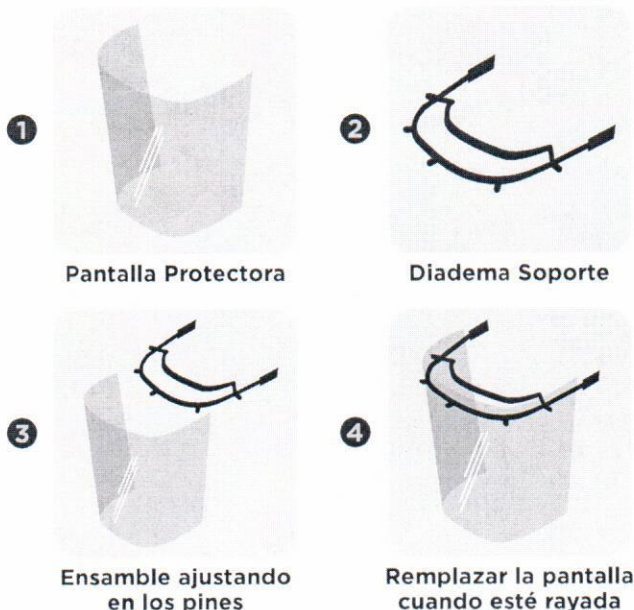

- ▶ Para asegurar la fijación de la careta a la cabeza del usuario se debe ensamblar un caucho, cordón o elástico para prendas de vestir, acorde con la necesidad o disponibilidad.
- ▶ Ajuste a su medida el cordón o elástico antes de iniciar su uso.
- ▶ Verifique que la pantalla protectora esté bien ensamblada y no esté suelta en ninguno de los puntos de ensamble.
- ▶ Se recomienda lavar con agua y jabón antes de su primer uso.

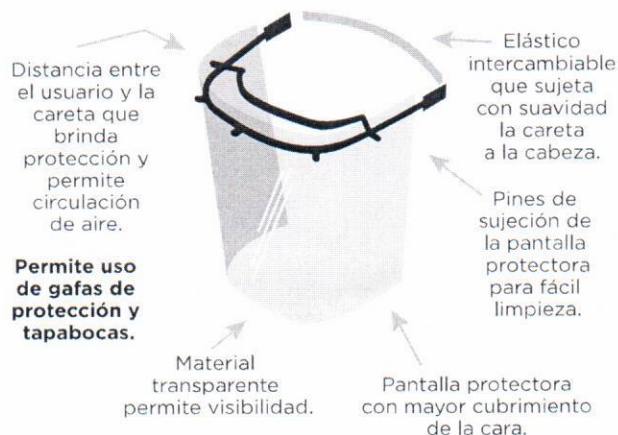

Permite uso de gafas de protección y tapabocas.

Protocolo de desinfección

Remitirse a los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social en el documento de soporte "Limpieza y Desinfección en Servicios de Salud ante la introducción del nuevo coronavirus (SARS-COV-2) a Colombia", emitido el 16 de marzo de 2020.

Sugerencia de limpieza

- 1 En lo posible, trate de separar cuidadosamente las piezas para desinfectarlas por separado.
- 2 Lavar suavemente con una solución de agua caliente y jabón (43°C - 49°C).
- 3 Mantenga la careta sumergida en esta solución por 10 minutos.
- 4 Enjuague completamente con agua.
- 5 Permita que se seque al aire.

